



深圳葆丰



扫一扫公众号
获取葆丰更多产品资讯



扫一扫视频号
获取根管治疗相关知识

RT

根管再治疗锉



D1

D2

D3



问：RT锉的作用是什么？

答：RT锉是根管再治疗锉，用于根管再治疗时，清除牙胶尖等充填物。

材料：镍钛合金

颜色：金色/银色

长度：D1 (16 mm), D2 (18 mm), D3 (22 mm)

包装规格：6 支/盒 (板)

混装/单装

灭菌：≤134℃

深圳市葆丰医疗器械有限公司

地址：深圳市龙岗区横岗街道四联社区伟群路2号3栋103
电话：0755-28540953 传真：0755-28540953



RT

根管再治疗锉




型号、规格	扭矩	转速	横截面
○ D1 30/.08	2.0~3.0N·cm	250~360rpm	
○ D2 25/.08	2.0~3.0N·cm	250~360rpm	
○ D3 20/.07	2.0~3.0N·cm	250~360rpm	

产品特点：

D1尖端有切削功能，无需对锉加压便可进入根管冠部牙胶内。
D2和D3的尖端有导向功能，避免再治疗锉在根管的中下段产生偏移。

设计用途

设计用于依次去除填充材料，例如牙胶尖、具有芯核的牙胶填充物和糊剂填充物。这三个型号专为在根管再治疗之前打开冠状三分之一、中三分之一和根尖三分之一的不同需求而设计。

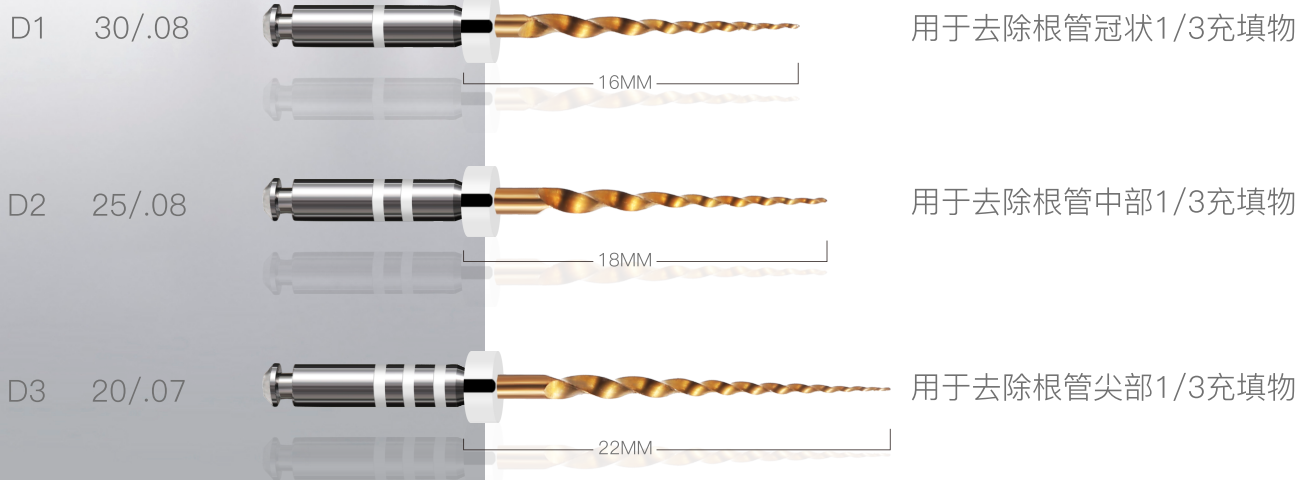

使用方法

- (1) 使用D1向根尖方向旋入牙胶尖，将材料旋出，使用深度不要超过根管弯曲处，不接触根管壁牙本质，操作时，经常退出，直至根管冠端1/3的充填材料被清理干净；
- (2) 使用D2从根管中部1/3去除充填物，提刷动作，去除根管壁的充填材料；
- (3) 必要时，使用D3从根管根尖1/3去除充填物，当取出D3锉检查时，只要器械的螺纹之间仍有根管充填材料，则继续去除；
- (4) 当充填材料充填深度未达到根尖孔时，使用小号手用锉疏通未充填部分的根管，确保其通畅及去除充填物的效果；
- (5) 评估确定根管通畅后，选用葆丰手用、机用根管器械进行精修、成型根管即可。